



# KANSUK KANPRES MODEL SEPERATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI

## 1- K2 DÖRTLÜ TORBADA ÜRÜN AYIRIMI İÇİN AŞAĞIDAKİ YOLU TAKİP EDİNİZ;

- EKRANDA SAĞ TARAFTA YER ALAN TORBA SEÇENEKLERİNDEN “DÖRTLÜ TORBA” SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ
- TAM KAN DOLU ANA TORBAYI ASKILARA ASINIZ
- ANA TORBANIN ALTINDAKİ HORTUMU “KLEMP 3”e TAKINIZ VE SAĞ-M DOLU TORBAYI YAN TARTIYA ASINIZ
- PLASMA TORBASININ HORTUMUNU “KLEMP1”den GEÇİREREK PLASMA TORBASINI ÜST TARTININ SOL TARAFINA ASINIZ
- 5TR TORBASININ HORTUMUNU “KLEMP2”den GEÇİREREK ÜST TARTININ SAĞ TARAFINA ASINIZ
- ANA TORBANIN VE SAĞ-M DOLU TORBANIN KANÜLLERİNİ KIRINIZ VE “START” BUTONUNA BASINIZ.
- AYIRMA İŞLEMİ SONA ERDİĞİ ZAMAN PLASMA VE SAĞ-M TORBASININ HORTUMU OTOMATİK OLARAK KAYNAK OLACAKTIR. HORTUMLARI KOPARTARAK ÜRÜNLERİ SAKLAMA DOLAPLARINA KOYUNUZ
- ANA TORBA İYİCE KARIŞTIRILDIKTAN SONRA EKRANDA GÖRÜNEN “KLEMP2 AÇILSIN MI” BUTONUNA BASARAK KLEMP 2nin AÇILMASINI SAĞLAYIP (EĞER SZ BASMAZSANIZ 30SN. SONUNDA KENDİSİ OTOMATİK OLARAK AÇILACAKTIR) 5TR TORBASINDAKİ PLASMANIN ANA TORBA ÇIKIŞINI VE TORBAYI YIKAYARAK ANA TORBAYA AKTARILIR. DİNLENDİRMEK ÜZERE ASKILI PANOYA ASINIZ.

## 2- K2 ÜÇLÜ TORBADA ÜRÜN AYIRIMI İÇİN AŞAĞIDAKİ YOLU TAKİP EDİNİZ;

- EKRANDA SAĞ TARAFTA YER ALAN TORBA SEÇENEKLERİNDEN “ÜÇLÜ TORBA” SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ
- TAM KAN DOLU ANA TORBAYI ASKILARA ASINIZ
- ANA TORBANIN ALTINDAKİ HORTUMU “KLEMP 3”e TAKINIZ VE SAĞ-M DOLU TORBAYI YAN TARTIYA ASINIZ
- PLASMA TORBASININ HORTUMUNU “KLEMP1”den GEÇİREREK PLASMA TORBASINI ÜST TARTININ SOL TARAFINA ASINIZ
- ANA TORBANIN VE SAĞ-M TORBASININ KANÜLLERİNİ KIRINIZ VE “START” BUTONUNA BASINIZ.
- AYIRMA İŞLEMİ SONA ERDİĞİ ZAMAN PLASMA VE SAĞ-M TORBASININ HORTUMU OTOMATİK OLARAK KAYNAK OLACAKTIR. HORTUMLARI KOPARTARAK ÜRÜNLERİ SAKLAMA DOLAPLARINA KOYUNUZ

## 3- TROMBOSİT AYIRIMI İÇİN AŞAĞIDAKİ YOLU TAKİP EDİNİZ;

- EKRANDA SAĞ TARAFTA YER ALAN TORBA SEÇENEKLERİNDEN “İKİLİ TORBA” SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ
- ÖNCEDEN DİNLENDİRİLİP TEKRAR SANTRİFÜJ EDİLEN BUFY COAT DOLU TORBAYI ASKILARA ASINIZ
- 5TR TORBASININ HORTUMUNU ÖNCE ÜST SENSÖRDEN SONRA KLEMP1 den GEÇİREREK TORBAYI ÜST TARTIYA ASINIZ VE “START” BUTONUNA BASINIZ.
- ÜRÜN AYIRIMI SONA ERDİĞİ ZAMAN OTOMATİK OLARAK 5TR TORBASININ HORTUMU KAYNAK YAPILACAKTIR HORTUMU KOPARTARAK AYRILMIŞ ÜRÜNÜ AGİTATÖR CİHAZI ÜZERİNDE İNKÜBATÖR CİHAZI İÇERİSİNDE SAKLAYINIZ.