



HELMER MARKA İ VE PRO MODEL AJİTATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI

- CİHAZ DOĞRUDAN GÜNEŞ GÖRMEYECEK, SIVI İLE TEMAS ETMEYECEK, KENARLARINDA VE ARKASINDA EN AZ 10 CM BOŞLUK BIRAKILACAK ŞEKİLDE DÜZ VE SAĞLAM BİR ZEMİN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMELİDİR.
- KISA OLAN ELEKTRİK KABLOSUNUN BİR UCU AGİTATÖR CİHAZININ ARKASINDAKİ GÜÇ GİRİŞİNE DİĞER UCU İSE İNKÜBATÖR CİHAZININ İÇİNDE SAĞ ALTTA BULUNAN PRİZE VEYA DİREK ELEKTRİK PRİZİNE TAKILIR.
- AGİTATÖR CİHAZI İNKÜBATÖR CİHAZININ İÇERİSİNE AGİTASYON İŞLEMİNİ YAPARKEN KENARLARA ÇARPMAYACAK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLİR.
- AGİTATÖR CİHAZI AÇMA KAPAMA DÜĞMESİNDEN AÇILIR
- İNKÜBATÖR CİHAZI AÇMA KAPAMA DÜĞMESİNDEN AÇILIR.
- İNKÜBATÖR CİHAZININ ÖN KAPAĞI KAPALI OLDUĞU DURUMLARDA 22°Cde ÇALIŞACAK VE TROMBOSİTLERİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SAKLAYACAKTIR. UZUN SÜRE KAPAĞIN AÇIK KALMASINDAN KAÇINILMALIDIR.

TEMİZLİK

- Cihazın içi ve dışı hafif nemli bez ile silinir. (kullanıcı tarafından haftada bir kez yapılmalıdır)
- Kesinlikle cihazın içine veya dışına sıvı dökülmemelidir. Sadece silinmelidir